



gebruiksaanwijzing

Dipleg

Indicatie

Slappe verlammingen, abductieproblemen en ondersteuning bij exorotatie.

Toepassing

Het aanbrengen van de FlexiOr® DIPLEG ligorthese gebeurt op basis van de volgende drie stappen.

Stap 1:

Breng het kussen vanaf het voeteneind onder de hielen aan.

Stap 2:

Trek het kussen onder de benen naar boven richting het bekken, zodat de benen over de volle lengte worden ondersteund.

Stap 3:

Zorg dat het spits toelopende deel hoog tegen de stuit wordt aangebracht en dat de verhoogde zijde is gericht naar de voeten.

** Situatieschets: cliënt ligt in rugligging, ligorthese verticaal, hoge deel bij de voeten, lage deel tegen de stuit.*

Attentie

- De hielen liggen bij voorkeur vrij van het kussen, waarbij ze eventueel de matras licht mogen raken (geen druk).
- Om de juiste positie van het kussen aan te geven is de bovenkant van de orthese en bijpassende hoes licht gekleurd. Daarentegen zijn de bodem en de zijkanen donker gekleurd.
- Bij hygiënische verzorging van bijvoorbeeld liezen of stuit hoeft de orthese niet verwijderd te worden. Het simpelweg terug trekken van het kussen tot de onderbenen creëert ruimte voor behandeling zonder ondersteuning te verliezen.

